



	Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
 <b>Hände- desinfektion</b>	<b>Händedesinfektion hygienisch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor und nach Patientenkontakt.</li> <li>• Nach Kontakt mit (potentiell) infektiösem Material.</li> <li>• Vor aseptischen Arbeiten (wie z. B. Vorbereitung von Infusionen).</li> <li>• Nach jedem Ablegen von Schutzhandschuhen.</li> </ul>	ASEPTOMAN® MED _____	30 Sekunden _____	Ausreichende Menge Desinfektionsmittel in die hohlen, trockenen Hände geben. Hände während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Hierbei insbesondere Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalze berücksichtigen und ggf. portionsweise erneut Produkt aufbringen.	Alle Mitarbeitende _____ _____
 <b>Fläche</b>	<b>Spender: Bedienhebel, Auslauf, Gehäuse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Routine mind. 1x wöchentlich.</li> <li>• Direkt bei Kontamination.</li> </ul>	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) <sup>3</sup> ULTRASOL OXY® (WIPES) <sup>2</sup> _____	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Auch Auslauf desinfizierend reinigen.	Mitarbeitende der Praxis <sup>1</sup> Mitarbeitende Reinigung <sup>1</sup> _____ _____
	<b>Spender Innenaufbereitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entsprechend den Angaben im Hygienehandbuch.</li> </ul>	_____	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten	Herstellerangaben beachten.	Mitarbeitende der Praxis <sup>1</sup> Mitarbeitende Reinigung <sup>1</sup> _____ _____
	<b>Medizin. / technische Geräte z. B. Blutdruckmanschetten, Stethoskop, Ohroliven, Elektroden, Fieberthermometer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sofort nach Gebrauch.</li> </ul>	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) ULTRASOL OXY® (WIPES) _____	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Herstellerangaben zur Aufbereitung beachten.	Fachpersonal <sup>1</sup> _____ _____
	<b>Patientennahe Flächen z. B. Behandlungsliegen/ -tisch, -stuhl, Bett, Lagerungshilfen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nach Patientenwechsel.</li> <li>• Direkt bei Kontamination.</li> </ul>	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) <sup>3</sup> ULTRASOL OXY® (WIPES) <sup>2</sup> _____	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Fachpersonal <sup>1</sup> _____ _____
			OPTISAL® N _____	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten		

<sup>1</sup> Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

<sup>2</sup> Bei erforderlicher viruzider und sporizider Wirksamkeit.

<sup>3</sup> Anwendungen auf kleinen Flächen.



Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
Transportwagen z. B. Verband- / Notfallwagen	• Arbeitstäglich. • Direkt bei Kontamination.	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) <sup>3</sup> ULTRASOL OXY® (WIPES) <sup>2</sup>	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Fachpersonal <sup>1</sup> _____ _____
		OPTISAL® N	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten		
Arbeitsflächen z. B. Flächen zum Stellen von Medikamenten, Rolltische, Injektionstabletts	• Vor der Nutzung.	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) <sup>3</sup> ULTRASOL OXY® (WIPES) <sup>2</sup>	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Fachpersonal <sup>1</sup> _____ _____
		OPTISAL® N	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten		
Inventar z. B. Regale, Schränke	• Routine mind. 1x wöchentlich. • Direkt bei Kontamination.	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) <sup>3</sup> ULTRASOL OXY® (WIPES) <sup>2</sup>	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende der Praxis <sup>1</sup> Mitarbeitende Reinigung <sup>1</sup> _____ _____
		OPTISAL® N	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten		
Häufige Kontaktflächen z. B. Lichtschalter, Türgriffe	• Arbeitstäglich. • Direkt bei Kontamination.	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) <sup>3</sup> ULTRASOL OXY® (WIPES) <sup>2</sup>	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende der Praxis <sup>1</sup> Mitarbeitende Reinigung <sup>1</sup> _____ _____
		OPTISAL® N	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten		

<sup>1</sup> Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

<sup>2</sup> Bei erforderlicher viruzider und sporizider Wirksamkeit.

<sup>3</sup> Anwendungen auf kleinen Flächen.



Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
Fußboden	• Direkt bei Kontamination.	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) <sup>3</sup> ULTRASOL OXY® (WIPES) <sup>2</sup>	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Bei Desinfektionstüchern kann ein Bodenwischer zur Hilfe genommen werden.	Mitarbeitende der Praxis <sup>1</sup> _____ _____ _____
		OPTISAL® N	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten		
Abfallbehälter	• Direkt bei Kontamination. • Abfall täglich entsorgen.	DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) <sup>3</sup> ULTRASOL OXY® (WIPES) <sup>2</sup>	3 Minuten 5 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände nur sicher umschlossen in den Abfall geben. Abfallschlüssel und Verordnungen der Länder einhalten.	Mitarbeitende der Praxis <sup>1</sup> Mitarbeitende Reinigung <sup>1</sup> _____ _____ _____
		OPTISAL® N	0,5% – 60 Minuten 1% – 15 Minuten		

Alle Präparate zur Flächendesinfektion können in ECO WIPES, ONE SYSTEM BASIC und ONE SYSTEM PLUS TUCHSPENDERSYSTEM eingesetzt werden.

<sup>1</sup> Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

<sup>2</sup> Bei erforderlicher viruzider und sporizider Wirksamkeit.

<sup>3</sup> Anwendungen auf kleinen Flächen.

Beim Einsatz von DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES) kann auf das Tragen von Schutzhandschuhen verzichtet werden.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Medizinprodukte, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit dem menschlichen Körper in Kontakt kommen, müssen nach Ablauf der Einwirkzeit gründlich mit Wasser nachbehandelt werden (Ausnahme: DESCOCEPT SENSITIVE (WIPES)). Bei behördlich angeordneten Desinfektionsmaßnahmen auf Grund meldepflichtiger, übertragbarer Krankheiten (§ 18 IfSG) sind Mittel und Verfahren aus der Desinfektionsmittelliste des Robert Koch-Institutes anzuwenden. Bei allen routinemäßigen Desinfektionsmaßnahmen kann eine Fläche wieder benutzt werden, sobald sie sichtbar trocken ist. Bei Produktwechsel wird eine Zwischenreinigung empfohlen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzkleidung tragen. Dieser Desinfektionsplan ist auf Basis der TRBA 250 erstellt. Die Prüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.

Stempel / Unterschrift